



**THUASNE**

# **MOBIDERM** *autofit*

A páciens önállóságát elősegítő  
**NYIROKÖDÉMA MEGOLDÁSOK**



# MOBIDERM *autofit*

A **MOBIDERM standard**, önszabályozó harisnya hozzáigazítható minden páciens egyedi morfológiájához és az idő múlásával annak változásaihoz.

## LEÍRÁS:

• **A felső végtag nyiroködémája esetén:**

**MOBIDERM autofit** önszabályozható karharisnya, ujjatlan kesztyűvel és hüvelykujjal

• **Az alsó végtag nyiroködémája esetén:**

**MOBIDERM autofit** önszabályozható zokni vagy combfix

## KINEK AJÁNLOTT?

- A nyiroködéma minden szakaszában.
- A fenntartó vagy csökkentő fázis végén használható.
- Olyan betegeknél, akiknél deformáció vagy progresszív ödéma jelentkezik.
- Azoknál a betegeknél, akik szeretnék az ödémát saját maguk szabályozni.
- Olyan betegek esetében, akiknek azonnal szükségük van a termékre.

## FŐ ÖSSZETEVŐK:


- **A ruházat külső rétegei:** 59% poliamid, 41% elasztán
- **Mobiderm a karon / lábbon:** tapadó, nem-szőtt poliuterán hab (15 x 15 mm kockák)
- **Mobiderm kéz / lábfej:** tapadó, nem-szőtt polietilén hab (5 x 5 mm kockák)



Méretszorozatos termékek:  
**gyors ellátás!**

# (MOBIDERM *autofit*) karharisnya a fenntartó fázisban


## HATÉKONYSÁGI EREDMÉNYEK:

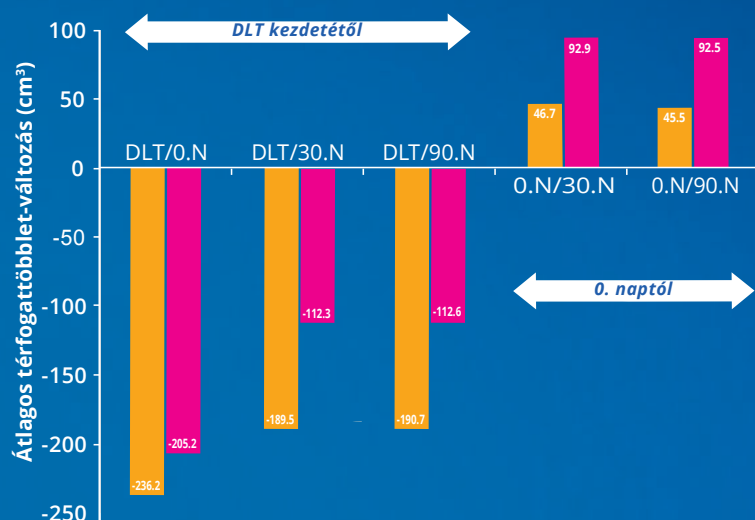

### Átlagos térfogat-többletváltozás (cm³)

- Térfogat-többlet vált. 0.N/30.N (%): 1,80 az I.csoportnál, míg 3,20 a II. csoportban (NS).
- A 30. napon, a DLT hatásának 85%-a maradt fenn az I. csoportnál, míg a II. csoportnál csak 54%.

■ I. csoport  
■ II. csoport

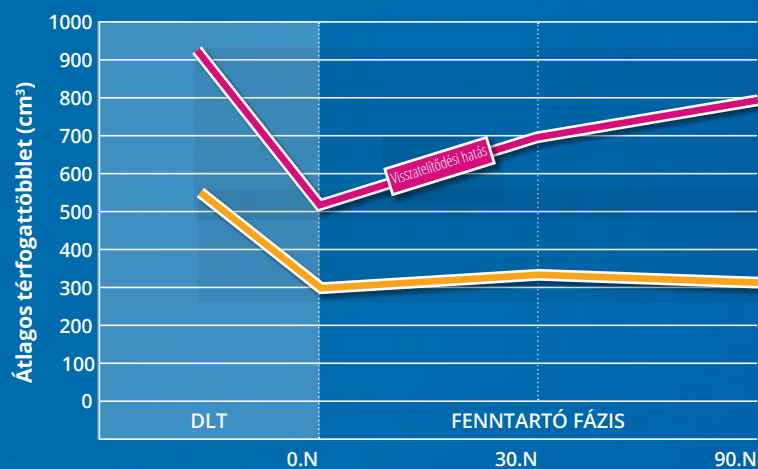

### Térfogateltérések a magas válaszreakciójú pácienseknél (cm³)

- A **MOBIDERM autofit** előnye még hangsúlyosabb azon DLT kezelt páciensek körében, akiknél magas válaszreakciót figyeltek meg (35% veszteség a DLT-Polit tanulmány során...)

■ I. csoport  
■ II. csoport

## KÖVETKEZTETÉS:

Az elsődleges kritérium eredményei arra engednek következtetni, hogy a **MOBIDERM autofit** a DLT kezelést követően csökkenti a nyiroködéma visszatelődésének hajlamát, különösen a DLT során erős válaszreakciójú pácienseknél. A 30. és a 90. nap közötti vizsgálati időszakban, amikor 40 páciens viselte a vizsgált gyógyászati segédeszközt, a nyiroködéma térfogatának stabilizálódása figyelhető meg.

A **MOBIDERM autofit** karharisnya értékes előnyöket nyújthat a krónikus betegségben szenvedő páciensek ápolóktól és rokonoktól való függésének enyhítésében, míg jó együttműködést biztosít a fenntartó kezelés során.

A **MOBIDERM autofit** éjszakai karharisnya a napközbeni kompresszió mellett előnyt biztosít a pácienseknek a nyiroködéma kezelés fenntartó szakaszában és növeli a páciens függetlenségét.

# Az önszabályozható éjszakai kompresszió szerepe a felső végtag nyiroködémájában

S. Mestre<sup>1,2</sup> & C. Calais<sup>1</sup> & G. Gaillard<sup>1</sup> & M. Nou<sup>1</sup> & M. Pasqualini<sup>3</sup> & C. Ben Amor<sup>3</sup> & I. Quere<sup>1,2,4</sup>  
Supportive Care in Cancer - DOI 10.1007/s00520-017-3652-5

1, Bel- és érgyógyászati osztály, Hopital St-Eloi, Montpellier, France

2, Érendszerei rendellenességek női sajátosságainak laboratóriuma EA2992, University of Montpellier and Nimes, France

3, THUASNE, Levallois-Perret, France - 4, Klinikai Kutató Központ, INSERM CIC 1001, Montpellier, France

## BEMUTATKOZÁS:

Azon betegek esetében, akiknél a mellrák következtében másodlagos nyiroködéma (BCSL) alakult ki, a nyiroködéma visszatelítődése figyelhető meg a nyiroködéma csökkentő terápiát (DLT) követően. A hosszútávú nyiroködéma-kezelések sikeressége a páciens együttműködésén múlik.

## CÉL:


A koncepció bizonyító tanulmány fő célja a **MOBIDERM autofit**, mint éjszakai kezelőeszköz hatékonyságának és biztonságosságának felmérése a DLT-t követő fenntartó fázis során a nappali Thuasne nyiroködéma-kezelő kompressziós eszközök használata mellett.



## EREDMÉNYEK:

Populáció leírás (években)

- Átlag életkor : **67**
- Átlagosan eltelt idő a mellrák diagnózisa óta: **11**
- Átlagosan eltelt idő a nyiroködéma diagnózisa óta: **7**
- Nyiroködéma stádiumai: **II, III**

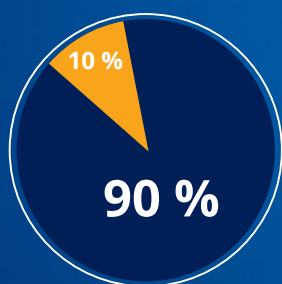

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI EREDMÉNYEK:

Milyen gyakran viselte a **MOBIDERM autofit**-et a tanulmány során? (I. és II. csoportban)

**A páciensek 90 % -a minden éjjel viselte.**

■ Minden este    ■ Heti 4-6 alkalommal

## ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK\*:

Milyennek értékeli a **MOBIDERM autofit**-et?


- |                                 |   |                            |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Könnyű / nagyon könnyű felvenni | → | a páciensek <b>70 %</b> -a |
| Gyors a felvétele               | → | a páciensek <b>85 %</b> -a |
| Hasznos az önszabályozás        | → | a páciensek <b>89 %</b> -a |
| Könnyű / nagyon könnyű levenni  | → | a páciensek <b>98 %</b> -a |
| Kényelmes                       | → | a páciensek <b>90 %</b> -a |

A már kompressziót használó **betegek 82 %-a** előnyben részesíti a terméket.

\* A betegkérdőívet minden tanulmányba bevett páciens kitöltötte a tanulmány végén.

# FELSŐ VÉGTAG: KARHARISNYA

SZABADALMAZOTT  
TERMÉK

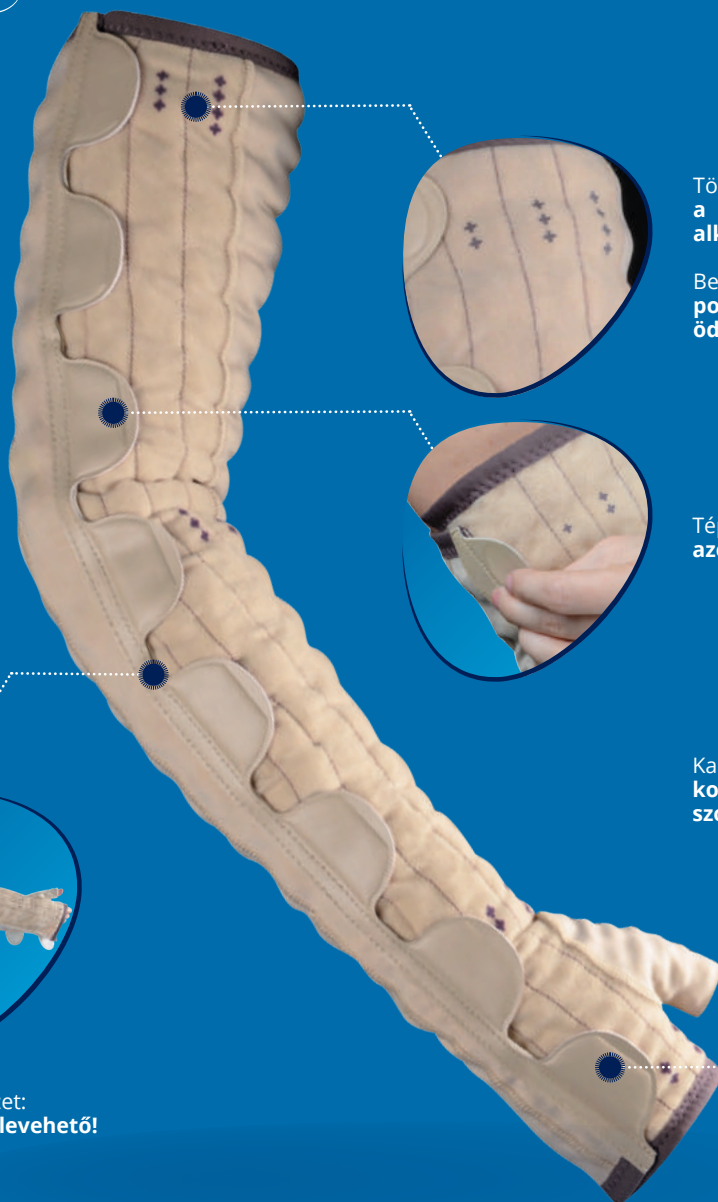

Több behúzó fül:  
a betegek egyedi morfológiájához való alkalmazkodás.

Beállítási jelek:  
pontos és megismételhető alkalmazás, az ödéma térfogatváltozásainak szabályozásához.

Téppózárás rögzítések:  
azonnali beállítás és kiváló teljesítmény.


Karharisnya felhúzható ujjatlan kesztyűvel:  
korlátozza az ödéma migrációját; a kéz a szokásos tevékenységekhez kiszabadítható.



Félig nyitott öltözet:  
könnyen fel- és levehető!



Anatómiai  
referenciapontok

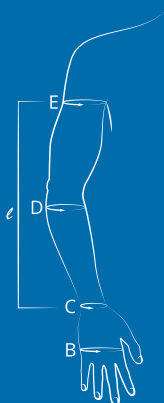

Karkörméret  
hónaljnál  
(e)

Alkar  
körméret\*  
(d)

Csukló  
körméret  
(c)

Kézfej  
körméret  
(b)

Termékkódok

Normál  $\ell = 40 - 45$  cm

Hosszú  $\ell = 45 - 50$  cm

## MOBIDERM autofit KARHARISNYA: JOBB KAR

T1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21	37330220100261	37330220100271
T2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21	37330220200261	37330220200271
T3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22	37330220300261	37330220300271
T4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22	37330220400261	37330220400271
T5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23	37330220500261	37330220500271
T6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24	37330220600261	37330220600271

## MOBIDERM autofit KARHARISNYA: BAL KAR

T1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21	37330220100262	37330220100272
T2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21	37330220200262	37330220200272
T3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22	37330220300262	37330220300272
T4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22	37330220400262	37330220400272
T5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23	37330220500262	37330220500272
T6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24	37330220600262	37330220600272

\* A legszélesebb részen

# ALSÓ VÉGTAG: ZOKNI VAGY COMBFIX

SZABADALMAZOTT  
TERMÉK



Félig nyitott öltözet:  
könnyen fel- és levehető!



Több behúzó fül:  
a betegek egyedi morfológiájához való alkalmazkodás.

Beállítási jelek:  
pontos és megismételhető alkalmazás, az  
ödéma térfogatváltozásának szabályozásához



Csúszásgátló talp:  
megakadályozza az elcsúszást  
járás közben



Tépzárás rögzítések:  
azonnali beállítás és kiváló  
teljesítmény.

Duplasoros:  
széles adaptálási tartomány,  
lehetővé teszi az illesztést  
mindkét lábra.

## ZOKNI

### MOBIDERM autofit ZOKNI

	Boka körméret (B)	Vádli körméret (C)	Térd körméret (D)	Termékkódok (egységes jobbos/balos)			
				Rövid ℓ (D) : 38 - 40 cm	Normál ℓ (D) : 40 - 42 cm	Hosszú ℓ (D) : 42 - 44 cm	Xtra hosszú ℓ (D) : 44 - 46 cm
<b>T1</b>	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
<b>T2</b>	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
<b>T3</b>	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
<b>T4</b>	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

## COMBFIX

### MOBIDERM autofit COMBFIX

	Boka körméret (B)	Vádli körméret (C)	Comb körméret (CG)	Termékkód (egységes jobbos/balos)			
				Rövid ℓ (G) : 67 - 72 cm	Normál ℓ (G) : 72 - 77 cm	Hosszú ℓ (G) : 77 - 82 cm	Xtra hosszú ℓ (G) : 82 - 87 cm
<b>T1</b>	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
<b>T2</b>	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
<b>T3</b>	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
<b>T4</b>	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234

# MOBIDERM autofit

## MOSÁSI ÚTMUTATÓ


Mosás előtt zárja össze a tépőzáras pántokat.

### Két mosási lehetőség áll rendelkezésre:

- **Kézzel:**  
hideg, szappanos vízbe áztassa be a terméket, tiszta szivaccsal dörzsölje meg, majd nyomkodja ki a felesleges vizet.
- **Géppel:**  
használja a gyapjú programot alacsony hőmérsékleten, és használjon mosózsákot. Nyomkodja ki kézzel a vizet.

Mindkét esetben hagyja megszáradni a terméket, közvetlen hőforrástól távol.

Ha az öltözetet nem hordja, tartsa lehetőleg fektetett állapotban, zárt tépőzárrel. Ha össze kell hajtani, helyezze a füleket kívülre.

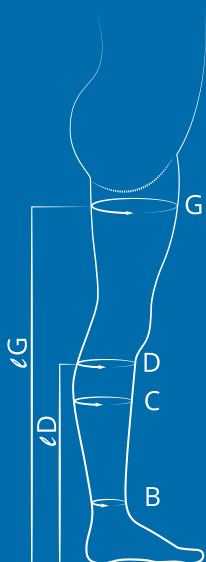

### Anatómiai referenciapontok:

B : boka körméret (a legkeskenyebb részen)

C : vádli körméret (a legszélesebb részen)

D : térd alatti körméret (a szárkapocscsont fejénél)

G : comb körméret (a legszélesebb részen)

lD : a térd talajtól mért távolsága (a zoknihoz - a méretet a térdhajlat alatt, hátul kell mérni)

lG : a comb talajtól mért távolsága (a combfixhez - a méretet a fenékhajlatnál kell mérni)





**THUASNE**


A

# MOBIDERM ESZKÖZRŐL

A **MOBIDERM** egy-két nem-szőtt fásli közé helyezett habszivacs kockákból álló segédeszköz. A **MOBIDERM** technológia csökkentő fásli alatt alkalmazható (fásli vagy mobilizáló lap formájában), vagy mobilizáló ruhákba építjük be.

A habszivacs darabkák és környezetük között alakuló nyomáskülönbségnek köszönhetően javítja a nyirokfolyadék áramlását és optimalizálja az elvezetést.

Az ödémás bőr alatti kötőszövetre gyakorolt nyíróerők által a **MOBIDERM** fel is puhítja a fibrotikus és szklerotikus területeket.

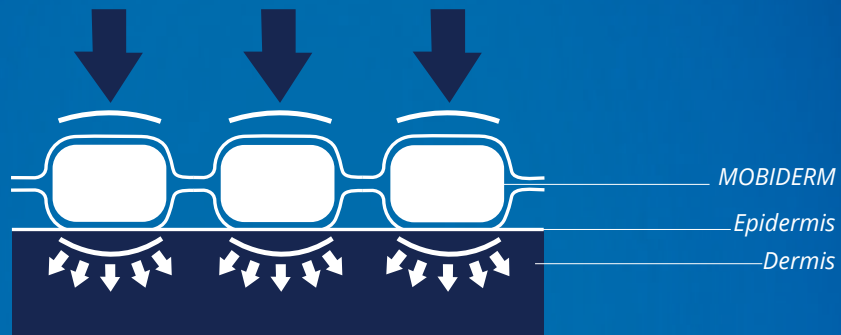

## A MOBIDERM EGY HIGH-TECH ÖDÉMCSÖKKENTŐ KOMPRESSZIÓS ESZKÖZ

SZABADALMAZOTT  
TERMÉK



### • HATÉKONYSÁG

- az ödéma térfogatának gyors csökkentése,
- a fibrotikus, szklerotikus vagy ödémás bőr felpuhítása.

### • PRAKTIKUSSÁG

- könnyű, kényelmes és rugalmas, biztosítja a mozgás szabadságát a páciens számára, ezáltal növeli a végtag nyirokelvezetési képességét.

### • KÉNYELEM

- puha érintkezés a bőrrel,
- alkalmazkodás az anatómiai formákhoz.

**FORGALMAZÓ: THUASNE HUNGARY KFT.**  
1117 Budapest - Budafoki út 60. - Magyarország  
e-mail: [thuasne@thuasne.hu](mailto:thuasne@thuasne.hu), [www.med-pont.hu](http://www.med-pont.hu)

**GYÁRTÓ: THUASNE SAS**  
120, Rue Marius AUFAN - CS10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex - France  
e-mail : [sales.export@thuasne.fr](mailto:sales.export@thuasne.fr)



UTOLSÓ AKTUALIZÁLÁS IDŐPONTJA: 2017.11.21